

Chlorine Disinfection

Engangsklude med aktivt klor og tensid



Varenr.: 25074



Varenr.: 25058

Bredspekret Sporedræbende Altid korrekt dosering

Wet Wipe Chlorine Disinfection engangsklude er imprægneret med klorgranulat

Med Wet Wipe Chlorine Disinfection opnår du en optimal og enkel desinfektion. Pakken indeholder en brudbar pose med tensidopløsning. Når posen anbrækkes, løber tensidopløsningen ned i kludene, hvor væsken opløser klorgranulatet, som omdannes til aktivt klor. Kludene er klar til brug efter 7 minutter.

Anvendelsesområder

Anvendes til desinfektion af overflader, og kontaktpunkter på forskelligt udstyr. Desinficerer effektivt mod Norovirus og f.eks. HIV og Hepatitis B, vegetative bakterier og gærsvampe ved 1 minuts indvirkningstid. Indvirkningstid mod bakteriesporer 10 min. Kan anvendes til desinfektion af overflader med synlig skimmelsvampvæskt ved 15 minutters indvirkningstid.

Wet Wipe Chlorine Disinfection er revurderet af CEI 6. Nov 2014. CEI har vurderet, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at Wet Wipe Chlorine Disinfection har effekt overfor vegetative bakterier, svampe og gærsvampe, virus, myko- og tuberkelbakterier samt sporer.

Engangskludene produceres i to størrelser; maxi og mini.

Varenr. 25074: Chlorine Disinfection Maxi
Karton á 24 pakker
1 pakke indeholder 5 klude, 43×30 cm

Varenr. 25058: Chlorine Disinfection Mini
Karton á 20 pakker
1 pakke indeholder 10 klude, 21×29 cm

Indhold granulat

100 % natrium dichloroisocyanurate dihydrat

Indhold aktiverede og brugsklare klude

Aktivt klor > 1000–1200 ppm

Tensid < 0,5%

Bemærk

De aktiverede og brugsklare engangsklude bevarer desinfektionseffekten op til 48 timer efter aktivering. Kludene produceres i to størrelser.

Produceret i Tyskland. Sikkerhedsdatablad og brugsvejledning kan rekvireres.

Husk altid at læse brugsvejledningen før brug.